

洗浄剤／潤滑剤

ユニバーサルクリーナー

ユニバーサルクリーナーは、錆防止効果のある洗浄剤／潤滑剤です。手術器具専用としてきわめて微少な隙間（ボックス・ロックやすき間）にも浸透し、水に溶けやすく、器具残留がありません。

すぐれた洗浄
&
潤滑能力

血液・タンパク質
除去

錆び・変色・腐食
防止

泡立ちが少なく
すすぎ簡単



これ1本で簡単!!

“No aminor Bi-productus”

使用方法

1 ボトルを平らなところに置き、キャップを外してからボトル中央部を押して、クリーナーを計量部まで押し上げる。計量したクリーナーを希釈する容器に入れ湯又は水を入れ希釈する。キャップをしっかり締め、保管する。

2 浸漬法 ユニバーサルは水の温度により希釈率が異なります
水1ℓあたりユニバーサル10mlを加えて希釈する。(約100倍)
温水(40℃～50℃)1ℓあたりユニバーサル5mlを加えて希釈する。(約200倍)

3 浸漬時間
20分～2時間 (器具の汚れ度合にて希釈率&浸漬時間を調整してください。)

4 洗浄
洗浄(浸漬又は超音波)後は十分に水洗を行ってください。

■仕様

種類	アルカリ性
品名	ユニバーサルクリーナー
注文番号	40-805 240ml 梱入数5本
	40-810 960ml 梱入数6本

△注意 この洗浄剤／潤滑剤はアルカリ性溶液です。
1) 目、皮膚、衣類などに付着しないように注意してください。
2) 万一目に入ったときは大量の水で洗い流した後、医師に相談してください。

輸入・発売元



株式会社 **ホワイトメディカル**
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2 第一ビル3F
Phone.03-3802-0655 FAX.03-3802-0688
http://www.whitemedical.co.jp

