

ボタン	滅菌種類	滅菌温度	滅菌時間	サイクル時間	
				Statim2000S	Statim5000S
	中空未包装	134°	3.5分間	約 8分	約 11分
	中空未包装	134°	18分間	約 23分	約 26分
	個体未包装	134°	3.5分間	約 6分	約 9分
	中空包装	134°	3.5分間	約 11分	約 16分
	中空包装	134°	18分間	約 25分	約 30分
	ゴム・プラスチック	121°	15分間	約 19分	約 21分
	ゴム・プラスチック	121°	30分間	約 34分	約 36分
	乾燥		乾燥 60分		

* 表のサイクル時間は、搭載物無し状態でウォームスタート時のトータル時間になります。

2000S/5000S 製品情報

製品名	Statim 2000S	Statim 5000S
品番	01-151002	01-221005
本体外形寸法	W415×D485×H150mm	W415×D550×H190mm
滅菌カセット内径寸法	W180×D280×H40mm	W180×D380×H80mm
水タンク容量	4L	4L
製品重量(空の状態)	21kg	33kg
電源	100V・50/60Hz 12A	
医療機器認証番号	第221AABZI00196000号	

Statim2000S/5000S アクセサリー

品番	製品名
01-100008A	2000S 滅菌カセット
01-101613S	5000S 滅菌カセット
01-100028S	2000S カセットシール
01-101649S	5000S カセットシール
99-108332	滅菌インジケータ (250枚入り)
20ZPLUS	スタットドライ 57ml
01-102119S	バイオロジカルフィルター



スタットドライ 57ml

STATIM 関連製品



STATIM 専用クリーンウォーター

品番 CL12
容量 2L
1箱 2L×6本
成分 精製水



蒸留水精製器 アクアスタット

品番 W10120S
サイズ L406×W245×H384
製造能力 約5時間30分で4L
電源 110V・50/60Hz・750W
製造元 SciCan



SciCan
A HIGHER STANDARD



Statim Cassette Autoclaves 2000S/5000S

販売元
WHITE MEDICAL

株式会社 ホワイトメディカル
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL▶http://www.whitemedical.co.jp
E-mail:white1@sepia.ocn.ne.jp

選任製造販売業者
株式会社 コーブリッジ
サイキャン社
外国指定管理医療機器製造等事業者

Statim2000S 最短 6分滅菌完了
Statim5000S 最短 9分滅菌完了

最短6分滅菌完了「カセット式卓上型高圧蒸気滅菌器」

STATIM2000S/5000S

EN基準 (EN13060) 準拠

STATIM-Sカセットオートクレーブは小型蒸気滅菌器規定の欧州基準EN13060で定められている「あらゆる種類の被滅菌物を安全に滅菌することができる」に準拠している高性能な小型蒸気滅菌器です。今まで以上に厳格な基準をクリアし、より安全・安心してご使用頂けます。




STATIM-S滅菌の仕組み (陽圧パルス脱気式)

ポイント
1


STATIMは特殊な小型ボイラーにより高圧蒸気を素早くカセット内部に直接送りこみます。その為従来の卓上型オートクレーブより約3倍早く滅菌が可能です。

ポイント
2

STATIM-Sは従来の重力置換方式に加え、新たに陽圧パルス脱気式を採用しました。陽圧パルス脱気式とは、強制的に高圧蒸気の注入を繰り返すことにより(2000Sで3回、5000Sで6回)、カセット内部の残存空気を確実に排出させます。その結果、中空器具の滅菌効果がより確かなものとなります。

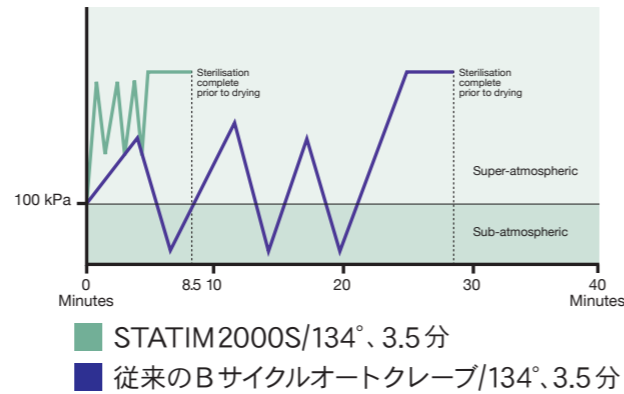

滅菌後の安全性

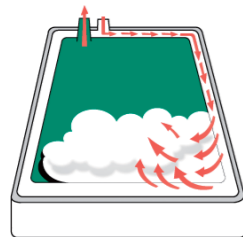

蒸気がカセット内に送られ、カセットシールを通じてカセット内の空気を効率よく排出します。一度排出された空気がカセット内に戻ることはありません。また滅菌後の通気乾燥はバイオリジカルフィルターとエアフィルターを通して送られる為、カセット内の再汚染がありません。

高いコストパフォーマンス

STATIM-Sカセットオートクレーブは最短6分で滅菌を完了をします。その為手術と手術の間に滅菌ができるため、高価なフエイコハンドピースや器具のセット数を削減することが可能です。長時間の高温滅菌が必要なく器具に及ぼす腐食や酸化を防ぐことができます。滅菌に使用する水を再利用することがなく、常にクリーンな状態で滅菌され安全です。



STATIMの特長



非常に薄いカセット厚のため、蒸気が素早くカセット内の温度を上げます。



精密な注入及び排出口が蒸気を素早くカセット内に送りこみ、またカセット内部のエアの排出を可能にします。



バイオリジカルフィルターとエアフィルターの2つのフィルターでバクテリアや孢子を取り除き、カセット内部へ新鮮な空気を送り込みます。

トレーサビリティ機能



STATIM専用のデータログを使用し、付属のUSBで毎回の滅菌工程が記録・保存できます。滅菌日・プログラム・温度・気圧を確認することができ滅菌工程の管理が可能です。

品名 STATIMデータログ (USB付)
品番 01-109556
*オプションになります。

選択できる2つの滅菌時間

STATIM-Sはそれぞれの滅菌サイクルで3.5分と18分の滅菌時間を選択できるようになり、今まで以上に幅広い使用が可能になりました。

134°、滅菌3.5分間

中空未包装器具・個体未包装器具・中空包装器具を134°、3.5分で滅菌を約6分 (STATIM2000S、個体未包装器具の場合) で完了します。手術と手術の間で素早く滅菌が可能です。

プリオンサイクル

134°、滅菌18分間

中空未包装器具・中空包装器具を134°、3.5分で滅菌を約23分 (STATIM2000S、中空未包装器具の場合) で完了します。